

Beknopte handleiding CoaguChek XS PRO / PRO II

1. Zet het apparaat aan door kort op de aan/uit knop te drukken.



2. Bij 'Gebruiker': je eigen (achter)naam invoeren
3. Tik in het scherm op patiënten test.
4. Toets bij patiënten- ID de achternaam en geboortedatum van de patiënt in.
5. Toets op het **v** hierna geeft het display aan dat u een teststrook in de meter moet schuiven.
6. Voer de teststrook in. Er volgt een piep/signaal als de teststrook correct is aangebracht.



7. Een zandloper verschijnt in beeld. Na +/- 1 minuut volgt een korte piep/signaal. Op het display verschijnt een teststrook met een bloeddruppel, de tijd in seconden (telt af van 180 naar 0 sec)



8. Prik nu aan de zijkant van de vingertop.
 Masseer/stuw het bloed naar de vingertop tot er een grote bloeddruppel vormt.
 Breng deze druppel binnen 15 seconden op de teststrook.
 Als de meter voldoende bloed heeft gedetecteerd volgt een signaal.



9. Leg het apparaat zachtjes horizontaal neer op een vlakke ondergrond. Raak het toestel en de strip niet meer aan. Er verschijnt in het scherm QC ✓ (interne controle van de strip is OK).



10. Wacht op de uitslag.
 Bij foutmeldingen de test herhalen.
 Bij twijfel van de meting of het testresultaat kan de test naar eigen inzicht herhaald worden.
 Noteer altijd bijzonderheden bij een INR < 1.5 of > 6.0. Noteer bij invoer van INR 8.0 of de INR exact 8.0 is of dat deze groter is dan 8.0.

Tips vingerprik

- Prik hoog in de vingertop
- Stuw vanaf de handpalm naar de vingertop in 1 beweging
- Maak een grote druppel bloed
- Bij koude vingers, handen enkele minuten laten opwarmen onder warme kraan en goed afdrogen



Validatie / Controles / codechip

- Verwissel alleen de codechip bij ingebruikname van strips met een andere code.
- De door ons uitgegeven strips zijn gevalideerd.
- Controles op de apparaten bij NPT huizen worden 2x per jaar uitgevoerd door de trombosedienst. De contactpersoon ontvangt tijdig bericht hierover.

Reinigen van de meter

- Reinig de buitenkant van de meter met een licht bevochtigde doek.
- Droog de meter hierna goed af met een schone, niet-pluizende doek.